


STYLO CALCAGNO

FISSATORE DA CALCAGNO

Versatile e modulare

Snodo sferico

Sterile

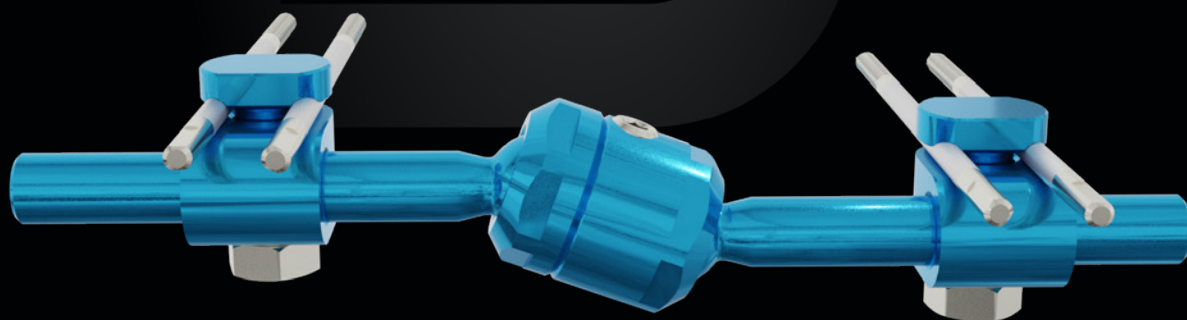

Introduzione

Il trattamento delle fratture del calcagno è spesso considerato una sfida per il chirurgo ortopedico, in quanto comporta criticità legate all'anatomia e alla biomeccanica.

Attualmente, nelle fratture tipo II, III e IV secondo Sanders, sebbene si pensi che il trattamento chirurgico con placche e viti possa dare risultati migliori rispetto al trattamento conservativo, analizzando la letteratura, non si riscontra un reale vantaggio di una metodica rispetto all'altra.

La sintesi interna comporta spesso riduzioni migliori, ma con elevate complicanze postoperatorie, mentre il trattamento conservativo, pur essendo meno cruento, può comportare problematiche nell'ottenere valide riduzioni.

La chirurgia mini-invasiva, associata a una nuova generazione di fissatori dedicati alle fratture di calcagno, consente di raggiungere risultati funzionali migliori, grazie a minori esposizioni chirurgiche, riduzione dei tempi operatori e di ospedalizzazione e minori complicanze.

L'utilizzo di moderni fissatori per il calcagno consente una riduzione percutanea e una buona stabilità della sintesi, riducendo sensibilmente il rischio di complicanze.

Indicazioni

Fratture articolari scomposte di calcagno tipo I, II, III e IV secondo la classificazione di Sanders, e fratture con associate gravi sofferenze dei tessuti molli.

CARATTERISTICHE

Kit sterile monouso

Modulare

Universale

Realizzato in lega di Alluminio e Acciaio

VANTAGGI


Pronto all'uso

Dotato di accessori per diverse applicazioni

Sia dx che sx

Leggero

Kit Stylo Calcagno

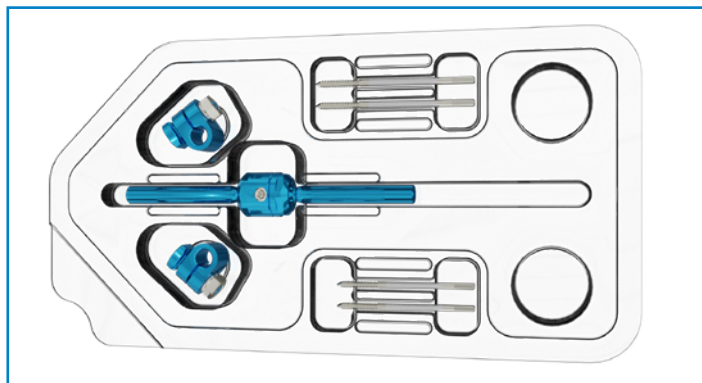

Descrizione

Q.tà

Corpo corto fissatore

1


Morsetti

2

Vite Ø 3.0 mm L 70 mm

4

Componenti

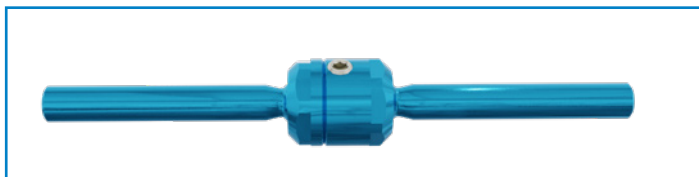

Corpo corto fissatore

Lo snodo sferico facilita la riduzione e permette la correzione su ogni piano.




Morsetto a doppia vite

Consente l'applicazione di una coppia di viti parallele. La chiusura del dado consente il bloccaggio delle viti sul morsetto e del morsetto sul corpo.

Per una migliore sintesi e stabilità della frattura è possibile, tramite l'utilizzo di accessori, la connessione di ulteriori viti e/o fili di Kirschner (da 1.5 mm a 3.0 mm) sul corpo del fissatore. I morsetti sono orientabili per ottimizzare il posizionamento degli elementi di presa.

Accessori

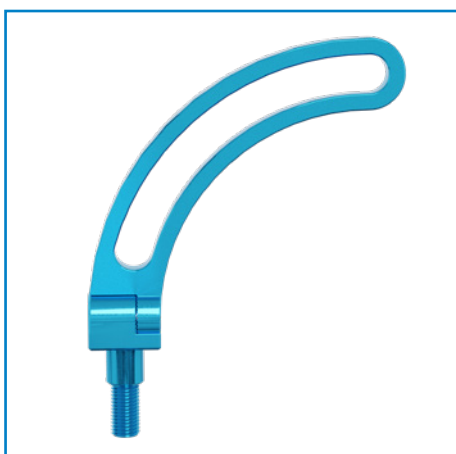

Arco 120° Ø 90 mm 5002016ST

Consente l'applicazione di ulteriori elementi di presa ossea (fili di K e/o viti) su piani diversi, garantendo una migliore stabilità.




Barra a binario 5002015ST

Consente l'applicazione di ulteriori elementi di presa ossea (fili di K e/o viti) su piani diversi, garantendo una migliore stabilità.



Morsetto singolo aperto 5002010AST

Consente il raccordo dell'arco o della barra binario al corpo del fissatore e/o la stabilizzazione di un'ulteriore elemento di presa, direttamente sul corpo del fissatore.

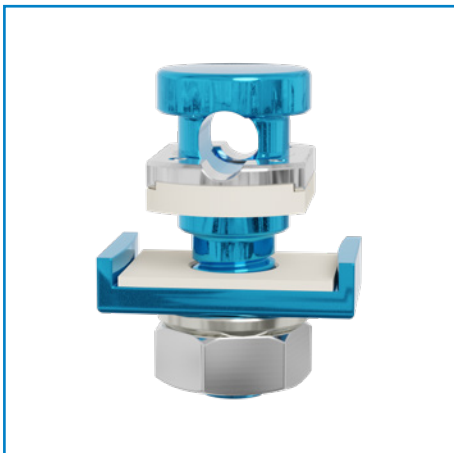

Morsetto singolo per arco 5000004ST

Consente la stabilizzazione di ulteriori elementi di presa all'arco o alla barra binario.



Morsetto singolo 5002010ST

Consente la stabilizzazione di un ulteriore elemento di presa sul corpo fissatore.



Morsetto prolungato o a T 5002011ST


Consente l'applicazione di una coppia di viti parallele su un piano ortogonale a quello del corpo del fissatore.

Configurazioni di impianto

Grazie alla modularità e alla versatilità del fissatore, sono possibili svariate tipologie d'impianto per meglio adattarsi alle necessità chirurgiche e anatomiche.



IMPIANTO BASE

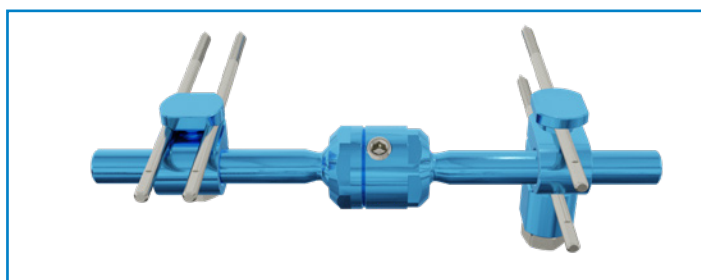

IMPIANTO CON MORSETTO A T



IMPIANTO MULTIPLANARE CON BARRA A BINARIO



IMPIANTO MULTIPLANARE CON ARCO

Queste sono alcune delle possibili configurazioni d'impianto.

Sterilizzazione

Il kit Stylo Calcagno è fornito sterile.

Per lo strumento si indica la sterilizzazione in autoclave a vapore saturo, secondo i seguenti parametri:

TEMPERATURA: 134°

ESPOSIZIONE: 5 min

5002002CST KIT STYLO CALCAGNO

COMPONENTI e ACCESSORI

Codice	Descrizione
5002007ST	Prolunga 40 mm
5002010ST	Morsetto singolo Stylo
5002010AST	Morsetto singolo aperto Stylo
5002011ST	Morsetto doppio prolungato Stylo
5002012ST	Morsetto doppio Stylo
5002016ST	Arco 120° Ø 90 mm
5002016CST	Arco 120° Ø 90 mm completo di morsetto per vite
5002015ST	Raccordo a binario Stylo
5000004ST	Morsetto singolo per arco
5002401ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 60 mm filetto L 20 mm
5002402ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 70 mm filetto L 20 mm
5002403ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 80 mm filetto L 20 mm
5002404ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 90 mm filetto L 20 mm
5002411ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 50 mm filetto Ø 2.5 mm L 12 mm
5002412ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 60 mm filetto Ø 2.5 mm L 12 mm
5002413ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 70 mm filetto Ø 2.5 mm L 12 mm
5002414ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 80 mm filetto Ø 2.5 mm L 12 mm
5002431ST	Filo filettato Ø 1.5 mm L 100 mm filetto L 4.0 mm Questo filo può essere usato con i morsetti 5002010ST, 5002010AST, 5002011ST e 5000004ST

STRUMENTARIO *

Codice	Descrizione	Q.tà
5006562STY	Cassetta sterilizzazione strumentario Stylo completa	
Composta da:		
5002070	Cannula doppia	1
5002056	Prolunga per vite	1
5000214	Chiave a T da 10 mm	1
5000623	Chiave piana da 10 mm	1
5000625	Chiave a T per viti ed esagonale da 3.0-5.0 mm	1
5002024	Unità di compressione e distrazione	1
5006560STY	Cassetta sterilizzazione strumentario ClickIt Stylo vuota	1

* I dispositivi impiantabili e sterili sono coperti dal marchio CE1936, lo strumentario non sterile riutilizzabile è coperto da marchio CE





SEDE LEGALE

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it